

# ProRhinel<sup>®</sup> Spray

ADULTES

## Jet tonique

CE 0459  
1999

## Lavage nasal en cas de Rhume et Rhinopharyngite

Spray nasal sous pression

Lire attentivement la notice avant d'utiliser **ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique**.  
Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

### 1. Pourquoi est-il important de faire un bon lavage nasal ?

En cas de rhume ou de rhinopharyngite, la muqueuse nasale agressée par les virus réagit en développant une réaction inflammatoire qui aboutit à une augmentation des sécrétions nasales. Cela se manifeste par un nez bouché ou un nez qui coule.

Désobstruer les fosses nasales en cas de rhume et de rhinopharyngite est nécessaire pour aider à restaurer la respiration nasale.

### 2. Quelle est la composition de ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique ?

**Composition pour 100 ml de solution :**

Bromure de benzododécinium, polysorbate 80, chlorure de sodium, alcool éthylique à 90°, glycérol, eau purifiée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.

L'azote, gaz inerte est le gaz propulseur de ce spray. Il n'est pas en contact avec la solution.

### 3. Dans quels cas ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique peut-il être utilisé ?

**ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique** contient un fluidifiant. Il peut être utilisé en cas de rhume et de rhinopharyngite.

Un lavage nasal avec **ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique** :

- facilite l'évacuation des mucosités et des agents infectieux,
- diminue l'obstruction nasale,
- libère le nez pour une meilleure respiration.

### 4. Quels sont les avantages de ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique ?

- Son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des adultes.
- Le conditionnement en flacon pressurisé permet de préserver la solution, rendant impossible l'entrée des mucosités à l'intérieur du flacon, le protégeant ainsi de toute contamination.
- **ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique** peut être utilisé quelle que soit la position du flacon, pour une plus grande facilité d'emploi.

### 5. Pourquoi choisir ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique ?

**ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes Jet tonique** est particulièrement adapté pour dégager les nez encombrés. Son jet est 4 fois plus puissant que le jet de **ProRhinel<sup>®</sup> Spray Enfants – Adultes**.

**ProRhinel<sup>®</sup> Spray Adultes jet tonique** peut aussi être utilisé en cas de nez qui coule. Il n'est pas adapté pour l'humidification des voies nasales, contrairement au **ProRhinel<sup>®</sup> Spray Enfants – Adultes**.

Existe en flacon pressurisé de 100 ml.

## 6. Comment utiliser ProRhinel® Spray Adultes Jet tonique ?

### Mode d'emploi :

ProRhinel® Spray Adultes Jet tonique peut être utilisé quelle que soit la position du spray.

- Pour un lavage nasal :

1 à 3 fois par jour en fonction de l'encombrement des fosses nasales.



Partie  
de l'embout nasal  
à entrer  
dans le nez.

1. Se moucher préalablement le nez.
2. Bien incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
3. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
4. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
5. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours laver la narine supérieure).

## 7. Quelles sont les précautions d'emploi ?

Par mesure d'hygiène, afin d'éviter toute contamination :

- Après chaque utilisation, nettoyer l'embout nasal sous l'eau chaude et le sécher avec un mouchoir propre.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, liquide vaisselle ou de désinfectant. Ne pas utiliser de micro-ondes.
- Utiliser un spray par personne.
- Ne pas utiliser en même temps plusieurs produits à usage nasal contenant un antiseptique.

ProRhinel® Spray Adultes jet tonique contient du bromure de benzododécinium, un ammonium quaternaire susceptible de provoquer une allergie locale chez les sujets sensibles à cette substance.

## 8. Comment conserver ProRhinel® Spray Adultes Jet tonique ?

**Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.**

Ne pas utiliser au-delà de la date limite inscrite sous le flacon.

Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Spray nasal sous pression :

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé.

Conserver le flacon dans son étui d'origine.


Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.



Novartis Consumer Health S.A. Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Suisse

### Distribué par :

GlaxoSmithKline Santé Grand Public  
23 rue François Jacob  
92500 Rueil-Malmaison

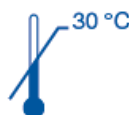

Ne pas conserver  
au-dessus de 30°C

Pour plus d'information : [www.prorhinel.fr](http://www.prorhinel.fr)



Créé en décembre 2016  
NO 97356544-02  
FR 938846 – ANA90NC19B